

EMP 2 PRO

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ



Programmes antalgiques TENS P1 à P10

- P 1 lombalgie
- P 2 lombo-sciatalgie
- P 3 névralgie cervico brachiale
- P 4 douleur chronique burst endorphinique
- P 5 Gate control+endorphinique
- P 6 gonarthrose coxarthrose
- P 7 epicondylite
- P 8 algodystrophie
- P 9 massage antalgique
- P 10 gate control classique 120 Hz

Programmes excito-moteur EMS en rééducation fonctionnelle P11 à P16

- P 11 traitement des contractures
- P 12 atrophie membres sup
- P 13 atrophie membres inférieurs
- P 14 renforcement membres supérieurs
- P 15 renforcement membres inférieurs
- P 16 retour veineux

Programmes rééducation spécial URO

- P 17 instabilité vésicale
- P 18 incontinence mixte
- P 19 incontinence d'effort

Programme de relaxation

- P 20 relaxation musculaire

SCHWA-MEDICO
FRANCE

30 rue Joffre · 68250 ROUFFACH
Tél : 03.89.49.73.61 · Fax : 03.89.49.72.43
www.schwa-medico-france.fr

EMP 2 PRO

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

PRIMORDIAL : avant la mise en marche, relier les câbles à la machine ainsi qu'aux électrodes (toujours 2 électrodes par câble), puis coller les électrodes sur la peau.

1 Mise en marche/arrêt




2 Choix du programme




appuyer sur la touche **P** pour choisir le programme souhaité

3 Réglage des intensités

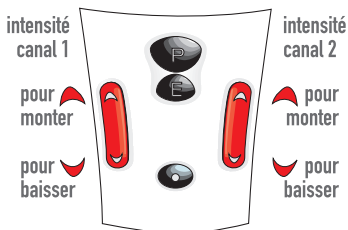

attention : verrouillage automatique des intensités. Pour déverrouiller baisser l'intensité puis remonter au niveau souhaité

4 Stopper la stimulation

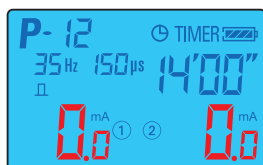

Pour stopper maintenir la touche **P** enfoncée pendant 2 secondes