

MODE D'EMPLOI

CE 0197 SYSTÈME DE MAGNETO-THÉRAPIE CCS HOME (Ref.451600-0181)



SCHWA-MEDICO
30, rue Joffre
68250 ROUFFACH

SOMMAIRE	Page
MISE EN SERVICE CCS HOME	3
TOUCHE SENSITIVE	3
FIN de SEANCE	3
ARRET DE LA MACHINE	3
LES EFFETS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES PULSÉS	4 – 5
CONTRE-INDICATIONS	5
INDICATIONS	5 - 6
RECOMMANDATIONS	6
NOMBRES de SEANCES	6 – 7
DONNEES TECHNIQUES	7
CLASSIFICATION AUX NORMES CE MEDICAL	7
L'APPAREIL COMPREND :	7
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	7
NOUVEAUX REGLAGES, MODIFICATIONS, ET REPARATIONS DE L'APPAREIL	8
COMBINAISON	8
GARANTIE	8

MISE EN SERVICE CCS HOME


1. Relier le câble de la natte corporelle ou du coussin à l'appareil.

Pour une stimulation avec la natte corporelle brancher le câble de la natte sur la prise située au dos de l'appareil avec le symbole :

Mettre le sélecteur noir situé au dos de l'appareil en position « II ».

Pour une stimulation locale avec le coussin brancher le câble du coussin sur la prise se trouvant au dos de l'appareil avec le symbole :

Mettre le sélecteur noir situé au dos de l'appareil en position « I ».

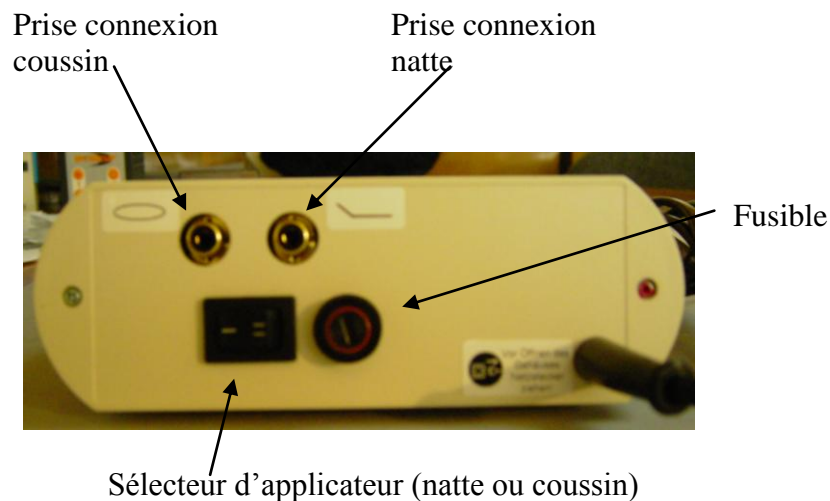

2. relier le câble d'alimentation de l'appareil à votre prise 220 volts. La diode en haut à gauche « ON » s'allume. L'appareil est en attente de démarrage.

3. Appuyer sur la touche « ON » ; l'appareil se met automatiquement sur 8 minutes ; si vous voulez changer le temps de la séance, sélectionner alors une des touches 4, 16, 24 minutes.

4. sélectionner ensuite la puissance d'émission numérotées 1, 2, 3, 4, 5. La stimulation commence alors pour la durée que vous aurez préalablement sélectionnée.

TOUCHE SENSITIVE

Si vous désirez une puissance de stimulation inférieure à celle du niveau 1, appuyez sur la touche sensitive qui réduira par 10 le niveau de stimulation choisi.

Pour pouvoir utiliser la fonction sensitive, appuyer sur la touche sensitive après avoir réglé le temps de la séance. Lorsque la diode lumineuse de la touche sensitive est alors allumée, sélectionner le niveau de puissance avec les touches 1, 2, 3, 4, ou 5. La stimulation commencera alors avec une puissance 10 fois inférieure au niveau de puissance sélectionné.

FIN de SEANCE

L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du temps pré-réglé et émet un bip sonore.

Vous pouvez écourter la séance à tous moments en appuyant sur la touche « STOP ».

ARRET DE LA MACHINE

Débrancher le câble d'alimentation de la prise de secteur 220 volts.

LES EFFETS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES PULSÉS

Les champs magnétiques font partis des plus anciennes énergies terrestres, d'importance vitale pour l'homme. Appliqués à des fréquences et intensités précises ils ont un effet bénéfique pour le corps humain. Un grand nombre d'études cliniques officielles l'ont confirmé. Ils permettent à l'organisme de regagner l'énergie dépensée quotidiennement. Le corps et ses fonctions retrouve plus facilement leur équilibre.

Bien-être et équilibre de l'organisme sont favorisés grâce :

1. à une meilleure circulation sanguine

Le champ magnétique pulsé accroît la circulation sanguine jusque dans les plus fins vaisseaux du système sanguin. Cela est confirmé par études photos-thermographiques. Une meilleure circulation sanguine permet un accroissement de l'apport en substrats énergétiques cellulaire et donc une augmentation du métabolisme cellulaire.

2. à un meilleur apport en oxygène

La magnéto-thérapie pulsée augmente l'apport en oxygène et permet un enrichissement en oxygène des tissus. Cela facilite l'activité des processus de l'organisme contrôlés par le système sympathique et para-sympathique et améliore les fonctions du système immunitaire.

3. à un meilleur métabolisme local

Un conseil : buvez si possible beaucoup d'eau avant et après une séance de magnéto-thérapie !

Une meilleure activité cellulaire pour un corps en pleine forme.

Eléments essentiels para-magnétiques et oligo-éléments indispensables tel que le cuivre , le molybdène, le cobalt et le manganèse peuvent être stimulés par magnéto-thérapie pour établir une bio-résonance énergétique :

- Influence directe sur le processus pathologique par l'application d'inductions de champs magnétiques pulsés
- Influence indirecte sur le processus pathologique par réaction de l'organisme développant une énergie auto-immunitaire déclenchée par les champs magnétiques pulsés
- Accroissement de la perméabilité de la membrane cellulaire débouchant sur une consommation plus importante en oxygène. Comme des études scientifiques reconnues le prouvent, ces réactions positives peuvent être produites par les champs magnétiques pulsés. Le champ magnétique de la terre est d'environ 0,4 Gauss.

La cellule

Les ions sont mis en mouvement au rythme de la pulsation des champs magnétiques pulsés et permettent une augmentation du potentiel de la membrane cellulaire et de la pression partielle de l'oxygène jusqu'à 800%.

CONTRE - INDICATIONS

Les personnes portant un stimulateur cardiaque, les femmes enceintes, les épileptiques ainsi que les personnes ne supportant pas les champs magnétiques, ne peuvent pas utiliser le CCS HOME. Pour les personnes sujettes à des troubles du rythme cardiaque ou des troubles de suractivité thyroïdienne connus et définis, la magnéto-thérapie n'est pas contre-indiquée. Les personnes atteintes de maladies graves ne peuvent utiliser la magnéto-thérapie que sous le suivi de leur médecin traitant.

INDICATIONS

Relaxation	Natte	
Bronchite, appareil respiratoire	coussin	
Courbatures, douleurs cervicales ou lombaires	coussin	
Décontracturant	coussin	
Récupération	natte	
Tendinite du coude	coussin	
Arthrose, arthrite, douleurs chroniques de l'appareil loco-moteur	natte/coussin	
Blessure aigüe, entorse, fractures	coussin	
Cicatrisation	coussin	
Contusion, hémorragie, œdème	coussin	
Déchirure musculaire, rupture de tendon, claquage	coussin	
Ostéonécrose	natte/coussin	
ostéo-arthrite	natte/coussin	7

Inflammations aigües et blessures

Hémorragie (coussin)
Inflammation musculaire (coussin/natte)
Déchirure musculaire (coussin)
Contusion, ecchymose (coussin)
Bursite (coussin)
Ténosynovites (coussin)
Claquage (coussin)

APPAREIL ARTICULAIRE et MUSCULAIRE

Hernie discale (coussin)
Inflammation des points moteurs et tendons (coussin)
Douleur du talon (coussin)
Inflammation articulaire, douleurs articulaires chroniques (coussin)
Cervicalgie, syndrome cervical (coussin)
Lumbago (coussin)
Coxarthrose (coussin)
Nécrose de hanche (coussin/natte)
Sciatique (coussin)
Blessure capsulaire (coussin), syndrome du tunnel carpien (coussin)
Gonarthrose, inflammation du genou (coussin)
Fractures (coussin)
Reconsolidation osseuse après OP (coussin)
Lombalgie (coussin/natte)
Dessolidarisation prothèse osseuse (coussin)
Crampes musculaires
Blessures musculaires
Myodynies
Ostéoporose, ostéopathie (coussin/natte)
Paralysie (coussin)
Douleurs des membres fantômes (coussin/natte)
Polyarthrite (coussin/natte)
Douleurs diffuses, peu localisables (coussin/natte)
Douleurs chroniques de l'épaule (coussin)
Ténosynovite (coussin)
Tendinite du coude (coussin)
Contractures musculaires (coussin)

RECOMMANDATIONS

Débrancher téléphone portable et autre objet électronique avant d'utiliser la machine CCS HOME.

Toujours s'allonger sur la natte, la tête du côté du câble de liaison à l'appareil
Pour avoir les meilleurs effets possibles, il est recommandé de boire un demi-litre avant le début d'une séance (3 litres par jour).
Se relâcher au maximum pendant la séance.

NOMBRES de SEANCES par jour

Il est recommandé 2 à 3 séances maximum par jour

Les 3 premiers jours : durée de séance de 8 minutes
4^{ème} au 7^{ème} jour : durée de 16 minutes par séances
à partir du 8^{ème} : durée de 24 minutes

Avec la natte corporelle
Matin - Midi : niveau 4 à 5
Soir : niveau 1 à 2

Avec le coussin
Matin – Midi : niveau 4 à 5
Soir : niveau 1 à 2

DONNEES TECHNIQUES :

Alimentation : 230 VAC/50Hz
Intensité nominale : 20 mA
Tension de sortie : champ magnétique pulsé max. 3 V
Puissance magnétique : 20 μ Tesla (à 20 cm au dessus de l'applicateur)
Fréquence : modulation de fréquence sur le logarithme népérien
Touche sensitive : diminution à 10% de l'intensité choisie
Fonction Timer : 4-8-16-24 minutes
Signal sonore en fin de programme

CLASSIFICATION AUX NORMES CE MEDICAL

Le CCS HOME est référencé dans la catégorie II a pour le matériel médical.

L'APPAREIL COMPREND :

1 CCS HOME	REF	462000
1 natte applicateur	REF	462010
1 coussin applicateur	REF	462013
1 sac de transport	REF	450980-0065
1 mode d'emploi	REF	451600-0181

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Aucun produit spécial n'est nécessaire à l'entretien et au nettoyage du CCS HOME.
Nettoyer l'appareil simplement avec un chiffon souple et non rugeux.
Faire attention de ne pas humidifier l'intérieur de l'appareil ainsi que la natte et le coussin applicateur. Dans le cas contraire, laisser contrôler l'appareil par nos services techniques avant toute nouvelle utilisation.

NOUVEAUX REGLAGES, MODIFICATIONS, ET REPARATIONS DE L'APPAREIL

Afin de pouvoir garantir une sécurité et un fonctionnement conforme, les nouveaux réglages, modifications ou réparations de l'appareil CCS HOME ne peuvent être effectués que par un technicien agréé à cet effet par le fabricant, et ceci conformément à la notice d'utilisation.

COMBINAISON

Le système CCS HOME ne peut utiliser qu'avec ses éléments connectables d'origine.

GARANTIE

L'appareil est garanti 2 ans après la date d'achat figurant sur votre facture.

Toute casse ou panne due à une manipulation non conforme au mode d'emploi ne sera pas prise en charge dans le cadre de la garantie.